

BRUGSANVISNING - KORT VERSION

REDAX, MODEL VARIANT PLEURADRÆNAGESYSTEM

1. Fyld vandlåsen

Fyld den medfølgende sprøjte med 50 ml sterilt vand eller natriumklorid.

Anbring sprøjten i porten til vandlåsen og injicer væsken i vandlåsen.



2. Tilslut patientslangen

Tilslut drænageslangen til patientens pleuadræn.

Kontroller altid inden tilslutning til patient, at valgte pleuadræn passer til Redax-slangens konnektor.

Ved behov kan medfølgende konnektor afklippes for ønske om bedre pasform med egen konnektor.

3. Tilslut sugeskilden


Tilslut sugeslange mellem Redax-boksen og sugeskilden i væggen.

Sugeskilden skal opfylde minimumskrav på -10 kPa for at garantere en korrekt funktion af trykreguleringen.



4. Regulering af luftstrøm for sug

Kontroller at den røde indikator ligger i det runde vindue.

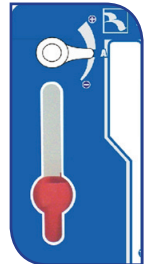

5. Regulering af sugetrykket

Indstil sugetrykket til ønsket værdi på drejeknappen. Det negative tryk oprettes omgående og systemet er klar til brug.



6. Skift af drænagesystem

Klargør et nyt drænagesystem i henhold til medfølgende brugsanvisning. Sluk for sugeskilden og afklem patientens pleuadræn under proceduren. Kobl det fyldte drænagesystem fra og tilslut det nye.

Husk at fjerne afklemningen igen fra patientens pleuadræn og tilslut sugeskilden påny.

Information

Passiv drænage - Systemet kan anvendes til passiv drænage

Diagnostik af luftlækage fra patienten ses ved luftbobler i vandlåsen. Luftbobler kan indikere lungen ikke er helt udfoldet.

Ved højt negativt tryk i Redax-boksen forsvinder vandet i vandlåsen og står i stedet højt i vandsøjlen. Sker dette, tryk da på ventilen (se rød pil i billed 3) i toppen af boksen.

Reduktion af sugetryk - Drej på drejeknappen mod urets retning indtil ønsket værdi opnåes.

BRUGSANVISNING - KORT VERSION

REDAX, MODEL VARIANT PLEURADRÆNAGESYSTEM



Denne korte brugsanvisning erstatter ikke eksisterende brugsanvisning, der medfølger det enkelte produkt.

Spørgsmål & svar.

Spørgsmål: Skal man efterfylde vandlåsen?

Svar: Ja, det er vigtigt at der er vand op til strengen i vandlåsen. Ved behov for efterfyldning anbefales det at begynde med ca. 10 ml. sterilt vand eller natriumklorid

Spørgsmål: Hvad kan der ske ved en stor pneumothorax?

Svar: Der kan observeres et meget stort tryk inde i systemet fra en stor pneumothorax. Der sker intet ved dette, men vær altid opmærksom på, at der er vand i vandlåsen. Trykket aftager i systemet i takt med at patienten kommer af med luft i pleura.

Spørgsmål: Hvordan observeres luft fra patienten i vandlåsen?

Svar: Det kan være svært at se luftbobler når der er sug på. Sluk suget, vandet bliver roligt og luft fra patienten vil kunne ses.